

アルカリ名人


ニューロイオン生水器

取扱説明書

ニューロイオン生水器 ION-11

本器には保証書を別添付しております。必ず「販売店名、お買い上げ年月日」等の記入をお受けになり、保証内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■製造販売元

美と健康をクリエイトする……
 **日本電子工業株式会社**
 健康機器事業部

〒465-0046 愛知県名古屋市中東区望が丘280
 TEL 052-779-1181 FAX 052-779-1103
 本社：〒470-0309 愛知県豊田市西広瀬町登293-1
 TEL 0565-41-2321(代) FAX 0565-42-1125
 東京営業所：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1丁目10-8
 石川第2LKビル5F
 TEL 03-5295-8241(代) FAX 03-5295-1119

お客様相談室
 フリーダイヤル

☎0120-416-336

商品に関するお問い合わせがございましたら上記、相談室までご連絡ください。(平日9:00~17:30)



保証書添付

保証書は別添付しておりますので、ご記入をお受けください。

医療機器承認番号 21200BZZ00219000

このたびは「イオン生水器」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本文に出てくる記号の部分は、製品を使用する前に注意深く読み、よく理解してください。

効能・効果と利用方法

本器は、医療用物質生成器として認可(医療機器承認番号21200BZZ00219000)を受けており、以下の効能効果が認められています。

胃腸症状改善のための
飲用アルカリ性
電解水の生成



利用方法

アルカリイオン水(還元水)

- アルカリイオン水の飲用量は一日当たり500~1000ml程度です。
- 日本茶・紅茶・ウイスキーの水割りなどにお使いになると味がまろやかで口当たりがよくなります。(調理用・製氷用・炊飯用などにあわせてお試しください。)
- グリセロリン酸カルシウムを添加するとカルシウムの補給になります。

酸性水

- アストリンゼントで、お肌をひきしめます。化粧水として、また、お肌のケア・洗顔にお使いいただけます。(注)飲用はしないでください。

製品本体の警告、 注意事項表示箇所

本体の両側に、警告および注意事項を表示しています。ご覧になってください。



目次

- 効能・効果と利用方法 1
- 安全上のご注意 3~4

- 各部の名称とはたらき 5~6
- 付属品の名称 7

- イオン生水器の取り付け方法 7~11

- イオン生水器の正しい使い方 12~16
- 浄水カートリッジの交換方法 17~18
- pHの測定方法 19

- イオン水生成の原理 20
- 修理に出される前に 21
- アフターサービスについて 21
- 別売品・製品仕様 22

はじめに

名称とはたらき

取り付け方法

使い方



仕様

安全上のご注意



必ずお守り下さい


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った取扱いをした場合に生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。








| | | |
|---|-----------|----------------------------------|
|  | 警告 | この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
|  | 注意 | この表示は「傷害を負う可能性及び物的損害が想定される」内容です。 |

●具体的な内容を、下記の図表示で区分し説明しています。





| | |
|---|----------------------------|
|  | この図表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
|  | この図表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |


 **警告**

体調を損なう原因になることがあります








| | |
|---|--|
|  | 医薬品をアルカリイオン水で飲用しないでください。 |
|  | じん(腎)不全、カリウム排泄(泄)障害などのじん(腎)疾患の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。 |
|  | 水道法基準に不適合な水は使わないでください。 |
|  | アルカリイオン水を飲用して異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善がみられない場合は、飲用を中止し、医師に相談してください。 |
|  | 医師の治療を受けている方、特にじん(腎)臓に障害がある方および、身体に異常を感じている方は飲用の前に医師に相談してください。 |
|  | 肌の弱い方およびアレルギー体質の方は酸性水(アストリンゼント)を使用する前に、医師に相談してください。 |
|  | 酸性水(アストリンゼント)を使用して肌に異常を感じたときは速やかに使用を中止して、医師に相談してください。 |

火災、感電の原因になることがあります







| | |
|---|---|
|  | 本体を水中に落とさないでください。もし、水中に落とした場合は次の手順に従ってください。 1・電源プラグをコンセントから抜いてください。 2・本体を引き上げてください。 3・販売店に修理を依頼してください。 |
|  | ご自身では本器の改造、分解、修理は絶対にしないでください。 |
|  | 濡れた手で電源プラグを触らないでください。 |
|  | 浴室、シャワールームなどの湿度の高い所で使用しないでください。 |

 **注意**







火災、感電の原因になることがあります

| | |
|---|---|
|  | 本器は日本国内で使用してください。 表示された電源電圧(交流100V)以外の電圧で使用しないでください。 |
|  | 電源コードを、傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。 また重いものを乗せたり、挟み込んだり、加工しないでください。 |
|  | 電源コードをステップルなどで固定することはおやめください。 |
|  | タコ足配線はおやめください。 コンセント部にほごりが付いた場合は電源プラグを抜いて、拭いてください。 |
|  | 電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みが緩い時は使用しないでください。 |
|  | 本体に水をかけたり洗わないでください。 |
|  | 電源プラグをコンセントに抜き差しする場合はコードを引っ張らずプラグを持って行ってください。 |


体調を損なうことがあります

| | |
|---|---|
|  | アルカリイオン水の飲用はpH9.5を適値とし、pH10以上は飲用不可であり直接飲用しないでください。 |
|  | 次のような水は飲用しないでください。 ●酸性水 ●pH測定液の入った水 ●排水ホースから出る水 |
|  | カルシウム添加剤は、付属のグリセロリン酸カルシウムを使用してください。 |
|  | カルシウムの添加を行う場合は、指定されたものを使用し、添加量、添加場所を守ってください。 |
|  | 初めて飲用する方は、pHが中性に近い範囲で少量から飲用してください。 |
|  | アルカリイオン水はアレルギー体質の方、虚弱体質、お年寄り、小さなお子様または、初めて飲用される方などは、一日100ml位から飲用してください。 |


故障または破損の原因になることがあります

| | |
|---|---|
|  | アルカリに弱い金属容器などは使用しないでください。容器を破損することがあります。 |
|  | 金魚や熱帯魚などの魚類の飼育水として使用しないでください。環境が変わり死ぬことがあります。 |
|  | 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。また、しばらく使用しなかった本器を使用するときは、最初の1~2分間通水し、正常に、かつ、安全に作動することを確認してください。 |
|  | カビが発生したときは販売店に相談してください。 |
|  | 寒冷地で水道が凍結する時期は、夜間、分岐栓を蛇口からはずし本器をタオル等で保温するか、あるいは暖かい場所に移動してください。故障の原因となることがあります。 |
|  | お手入れの際にベンジン、シンナー、クレンザーなどは使用しないでください。変色、ひび割れの原因になることがあります。 |

各部の名称とはたらき

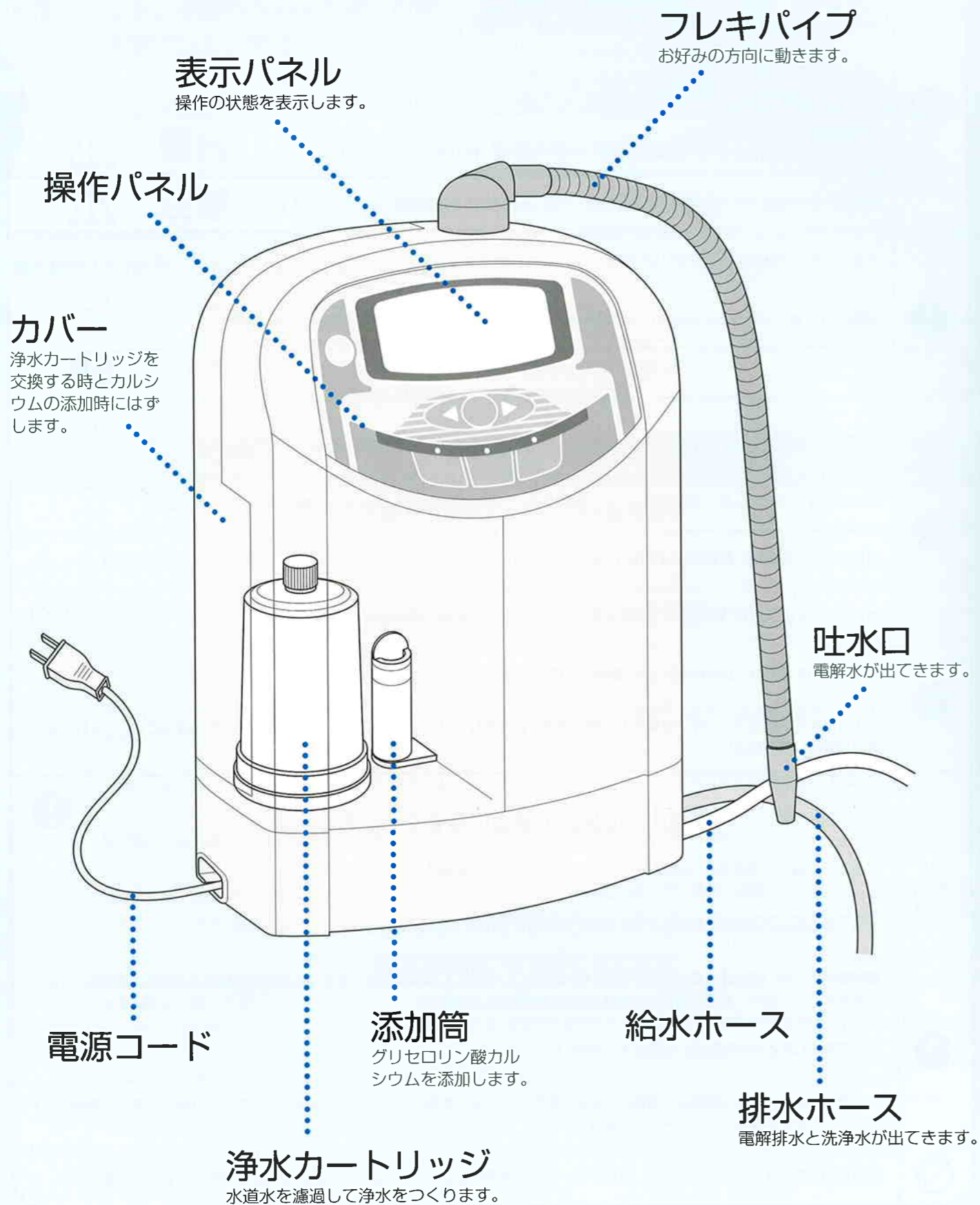


操作パネル

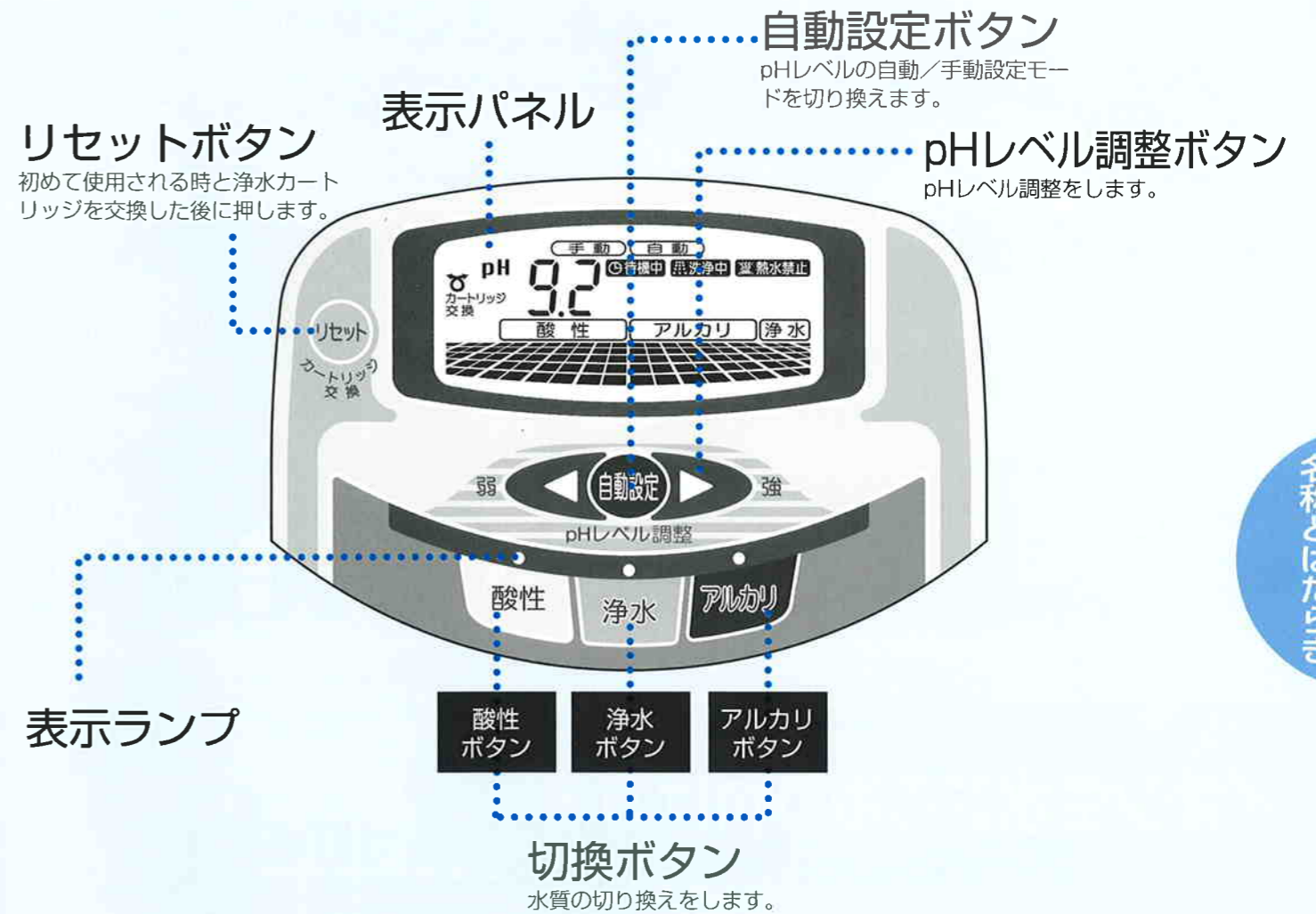


名称とはたらき

表示パネル

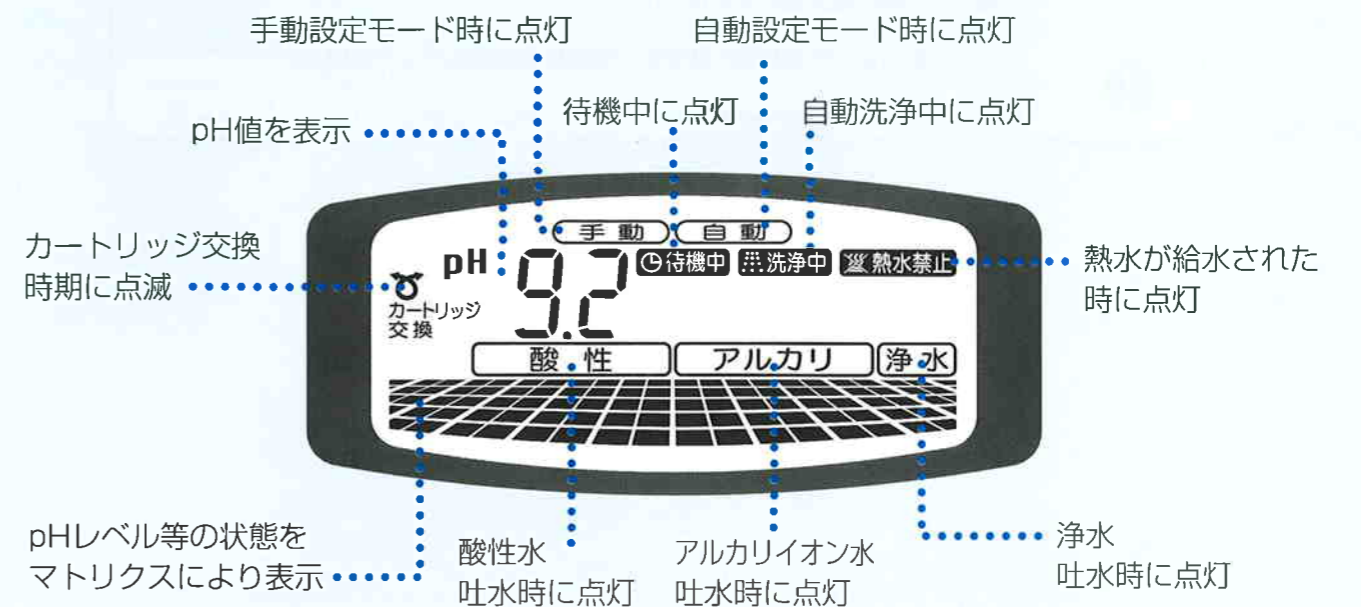

付属品の名称

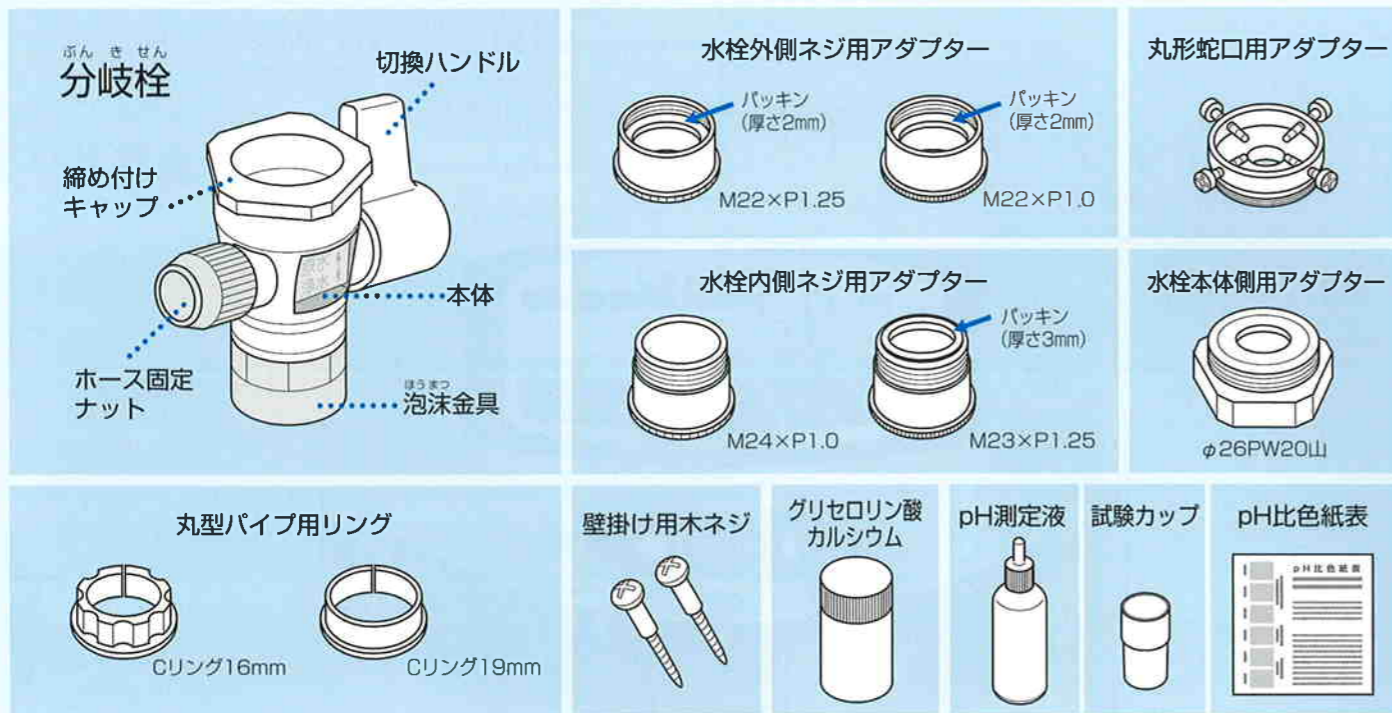

イオン生水器の取り付け方法

⚠ 注意


| | |
|---|-------------------------------------|
| ⊘ | 水のかからない場所で、火気・熱気のかからない場所に設置してください。 |
| | ホースが折れ曲がったりねじれたりしないようにしてください。 |
| | 水の出口をふさがないでください。 |
| | 本器の上に物を置かないでください。 |
| ! | 傾斜・振動などの安全状態に注意して設置場所を選んでください。 |
| | 壁掛けで使用する場合は必ず販売店または工事店に依頼して行ってください。 |

設置参考例



本体の設置は以下の2通りの方法があります。


A 据置として設置する場合

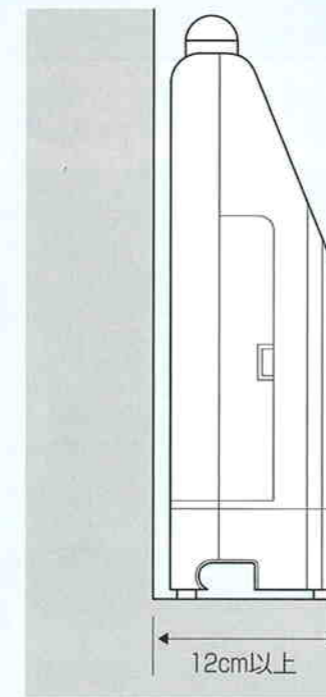

B 壁掛けとして設置する場合

⚠ 注意

| | |
|---|------------------------|
| ⊘ | 必ず付属のネジを使用して取り付けてください。 |
|---|------------------------|

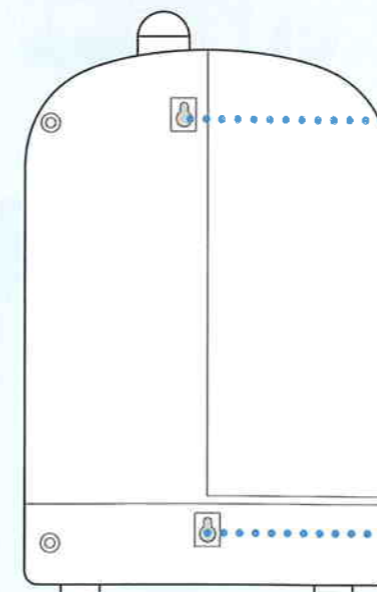

取付用穴2ヶ所

- 本体の背面に壁取付け用穴2ヶ所に防塵用のシールが貼ってありますのでそれをはがしてください。
- このページの右の「取付位置シート」を切り取り、この図をガイドにしてネジを壁につけ、本体をこのネジに掛けます。
- ネジは10~11mmほど残した状態にしてください。
- 本体重量が約3.5kgです。弱い壁には取り付けないでください。

切り取り線

取付位置シート

切り取り線

名称とはたらき

取り付け方法